

# PARRING AF COM-DEX OG COM-DEX REMOTE MIC MED EN MOBILTELEFON



**DEX™**

A WIRELESS WORLD

**Vi anbefaler først at parre telefonen med COM-DEX og derefter med COM-DEX Remote Mic.**

## **TRIN 1**

### **PARRING AF COM-DEX MED EN MOBILTELEFON:**

1. Sørg for, at COM-DEX Remote Mic er slukket
2. Luk halsslyngen på COM-DEX. Lysdioden på siden af COM-DEX begynder at blinke rødt og blå
3. Slå Bluetooth til på mobiltelefonen
4. Vælg COM-DEX fra listen over Bluetooth enheder i Bluetooth menuen

## **TRIN 2**

### **PARRING AF COM-DEX REMOTE MIC MED COM-DEX:**

1. Slå Bluetooth fra på mobiltelefonen
2. Når halsslyngen er lukket, begynder lysdioden på siden af COM-DEX at blinke rødt og blå. Hvis ikke, så åbn halsslyngen i 20 sekunder, og luk den igen
3. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde for COM-DEX Remote Mic. Lysdioden øverst på COM-DEX Remote Mic begynder at blinke rødt og blå
4. Forbindelse mellem COM-DEX Remote Mic og COM-DEX er oprettet, når lysdioden øverst på COM-DEX Remote Mic lyser grønt
5. Slå Bluetooth til på mobiltelefonen, og vælg COM-DEX fra listen over Bluetooth enheder

# COM-DEX REMOTE MIC - LYSINDIKATORER

## Lysdiode, topindikator:



Enhed tændt - streaming



Enhed tændt - streaming sat på pause



Tændt - ikke forbundet med COM-DEX

## Lysdiode, top- og sideindikator:



Parringsindstilling



Batteriniveau lavt - blinker rødt periodisk

## Lysdiode, sideindikator:



Fuldt opladet - lysdiode i siden



Oplader - lysdiode i siden

## Lydniveau - lysdiode i toppen:



Lydniveau - svagt



Lydniveau - normalt



Lydniveau - kraftigt

